

檢驗項目	Anti-JO1				版本 2015.03.25
中文名稱	可抽出的核抗體測定 JO1				
英文名稱	Anti-JO1				
適應症	抗 Jo-1 在多發性肌炎和皮肌炎中的陽性率為 20%～40%，抗 Jo-1 陽性典型患者的三個特徵如：多發性肌炎、多關節滑膜炎、關節痛、非侵襲性變性關節炎、腱鞘炎、肺泡纖維化或肺纖維化等，硬皮病相關症狀也偶見與其相關。				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	14 工作日完成發報告				
參考範圍					
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	12154B	點數	600 點	
檢驗方法及說明					