

檢驗項目	A 型鏈球菌檢測			版本 2019.07.03
中文名稱	A 型鏈球菌檢測			
英文名稱	group A streptococcus test			
適應症	A 群鏈球菌(group A streptococcus; GAS)，又稱熱原性(pyogenic)鏈球菌，是人類常見的傳染性致病菌，可引起咽喉炎、猩紅熱、丹毒，甚至可能致命的壞疽性筋膜炎(necrotizing fasciitis)等。			
檢體類別	Throat swab			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：1 天完成發報告 急作檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	Negative			
採檢容器和檢體量	專用棉棒(請洽檢驗科) 採集 Throat swab			
採檢注意事項	門診採檢完成後請於 30 分鐘內送至檢驗科			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法： 檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天； 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	12165B	點數	200 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢驗原理： EIA 酵素免疫分析法，試劑套組上含有 anti-group A streptococcus monoclonal antibody-colloid，若檢體含 GAS，則會與 colloid 上之抗體結合形成複合物，移動到反應視窗時，會被另一固定的 anti-group A streptococcus monoclonal antibody 抓住而呈色。</li> </ul>			