

檢驗項目	Microglobulin –beta (β2-Microglobulin, β2-M)			版本 2019.07.02
中文名稱微白蛋白	貝它 2-微球蛋白			
英文名稱	Beta 2-microglobulin ; β 2-M			
適應症	「活動性類風濕關節炎」和「腎臟疾病」臨床診斷之輔助工具			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma 尿液 Urine			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	血清、血漿：男性 < 2,157 ng/mL 女性 < 2,295 ng/mL 尿液 < 300 ng/mL			
採檢容器和檢體量	   <p>紅黃頭管 3ml 全血 綠頭管 3ml 全血 塑膠尿管，取尿液 10ml</p>			
採檢注意事項	尿液檢體採檢病人需先將尿液排空，喝大量的水，一小時內採集尿液			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法： 血清檢體於 2-8°C：可儲存 7 天，-20°C：可儲存 2 週 尿液檢體於 2-8°C：可儲存 2 天，-20°C：可儲存 2 個月 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12052B	點數	300 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光免疫分析法 (Chemiluminescent Immunoassay ; CLIA) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：4 – 50,000 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：4 ng/ml ● 干擾： <ol style="list-style-type: none"> 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體(Heterophilic antibodies)會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。 			