

|           |                                                                                                                                                                                        |              |    |                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|
| 檢驗項目      | Blood type                                                                                                                                                                             |              |    | 版本 2015.03.25          |
| 中文名稱      | ABO 血型                                                                                                                                                                                 |              |    |                        |
| 英文名稱      | Blood type                                                                                                                                                                             |              |    |                        |
| 適應症       | 常見的血型系統分爲 A 型、B 型、AB 型及 O 型四種，為輸血前必做之檢查。<br><br>以病人之紅血球及已知 anti-A 及 anti-B 試劑做血球分型，同時也以病人之血清及已知 A 型及 B 型紅血球做血清分型。有異常的血中蛋白、冷自體凝集抗體、直接抗球蛋白試驗陽性者、無 r 球蛋白之嬰兒、有 ABO 血型之亞型者、或某些有菌血症者會有反常的結果。 |              |    |                        |
| 檢體類別      | 血液                                                                                                                                                                                     |              |    |                        |
| 操作頻率      | 每天                                                                                                                                                                                     |              |    |                        |
| 操作時效      | 一般檢體：8 小時完成發報告<br><br>急作檢體：1 小時完成發報告                                                                                                                                                   |              |    |                        |
| 參考範圍      | A、B、O、AB 四種 type                                                                                                                                                                       |              |    |                        |
| 採檢容器和檢體量  | <div></div> <div>紫頭管 2ml 全血</div>                                                                   |              |    |                        |
| 採檢注意事項    | 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。                                                                                                                                                                  |              |    |                        |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                                                                                   | 平日收檢時間       |    | 週六收檢時間                 |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                                                                              | 8：00 - 21：00 |    | 8：00 - 17：00           |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                                                                                      |              |    | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 飲食限制：無。</li><li>● 用藥限制：無。</li><li>● 抗凝血劑：EDTA。</li><li>● 保存方法：室溫(立即送檢)。</li><li>● 運送條件：室溫。</li></ul>                                           |              |    |                        |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                                                                                    | 11001C       | 點數 | 30 點                   |
| 檢驗方法及說明   | 利用病人檢體的紅血球上帶有 ABO 血型抗原(A.B.AB.O)及血清中存有抗 a.抗 b 抗體可以與已知的抗原或抗體產生血球凝集反應,來做為病患 ABO 血型的鑑定                                                                                                    |              |    |                        |

