

檢驗項目	HCG - beta (Beta-HCG)			版本 2018.10.17
中文名稱	乙型人類絨毛膜激素			
英文名稱	Beta Human chorionic gonadotropin			
適應症	懷孕之早期檢查			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	<= 5 mIU/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法： 檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12022C	點數	400 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光微粒免疫分析法 (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay ; CMIA) ● 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)：1.2 – 225,000 mIU/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1.2 mIU/mL ● 干擾： 不可使用嚴重溶血的檢體。 干擾物質（例如嗜異性抗體、非特異性蛋白質或類似 hCG 之物質）可能會使結果錯誤升高或降低。這些干擾物質所引起之錯誤結果可能會超出整個分析範圍，而不只是在低濃度時，在無 hCG 時可能也會顯示有 hCG 的存在			