

檢驗項目	Bil-D			版本 2019.07.02
中文名稱	直接膽紅素			
英文名稱	Direct Bilirubin			
適應症	直接膽紅素在臨床上常用來評估肝臟及膽囊方面的疾病			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：4 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	0.00–0.45 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法： 檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下 ● 運送條件：室溫 ● 病患使用 IndocyanineGreen(ICG)將導致 Bili-T 異常偏高達 420%，因此建議先停用 ICG 一周後再檢查。			
健保代碼與給付點數	健保碼	09030C	點數	40 點
檢驗方法及說明	● 檢驗儀器/試劑：DxC600 / DBIL ● 方法：Diazo Reaction ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.04-50 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.04 mg/dL ● 干擾： 1. Hemoglobin > 62 mg/dL 2. Intralipid > 125 mg/dL 3. Indican > 0.50 mmol/L			