

檢驗項目	Cell count, CSF	版本 2015.03.25
中文名稱	腦脊髓液分析	
英文名稱	Cell count, CSF (Cerebrospinal fluid)	
適應症	輔助鑑別診斷各類微生物引發之腦膜炎、蜘蛛膜下出血、中樞神經系統腫瘤等疾病。	
檢體類別	腦脊髓液(CSF)	
操作頻率	每天	
操作時效	8 小時完成發報告	

參考範圍	體液檢驗內容與參考值(Cell count)			
	檢驗內容	中文名稱	參考值	
	WBC	白血球	成人：0-5 cells/ul	
			新生兒：0-30 cells/ul	
	RBC	紅血球	0 cell/ul	
	DC 白血球分類	Lym.	淋巴球	成人：60±20 % 新生兒：20±15 %
		Mono.	單核球	成人：30±15 % 新生兒：70±20 %
		Neu.	嗜中性球	成人：2±4 % 新生兒：4±4 %
Pandy test	定性蛋白測試	Negative		

採檢容器和檢體量	 <p>無菌小試管 採取檢體 1 ml</p>
----------	--

採檢注意事項	檢體收集後，請裝入小試管中；有凝固之虞的檢體裝入紫頭管中，需充分混合。
--------	-------------------------------------

收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156

<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 			
<p style="text-align: center;">健保代碼與給付點數</p>	<p style="text-align: center;">健保碼</p>	<p style="text-align: center;">16006C</p>	<p style="text-align: center;">點數</p>	<p style="text-align: center;">170 點</p>
<p style="text-align: center;">檢驗方法及說明</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：細胞計數—鏡檢，蛋白質—Pandy test。 ● 原理：Pandy 試劑中之酚(phenol)能使蛋白質變性而形成白色棉絮狀沈澱物，且與蛋白質含量成正比之關係。 ● 干擾因素：無。 			