

檢驗項目	Chlamydomphila pneumoniae IgM			版本 2015.03.25
中文名稱	肺炎披衣菌 IgM 抗體檢測			
英文名稱	Chlamydomphila pneumoniae IgM			
適應症	用於懷疑非典型肺炎感染之檢驗。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum。			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	陰性(Negative)			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12189C	點數	300 點
檢驗方法及說明	● 方法： 酵素連結免疫吸附分析法 (Enzyme-linked immunosorbent assay；ELISA) ● 干擾因素： 無			