

檢驗項目	C4			版本 2019.07.02
中文名稱	補體 4			
英文名稱	Complement 4			
適應症	補體是一群血清蛋白，用以摧毀感染物，尤其是當補體組成有缺失時，測定這些蛋白有助於免疫系統失常之診斷。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	4 小時完成發報告			
參考範圍	13 - 57 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法： 檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12038B	點數	275 點
檢驗方法及說明	- 檢驗儀器/試劑：DxC600 / C4 - 方法：免疫比濁法(Nephelometry)。 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 - 639 mg/dL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 mg/dL - 干擾：Intralipid > 2000 mg/dL			