

檢驗項目	Crea, body fluid, urine			版本 2015.03.25
中文名稱	肌酸酐(體液及尿)			
英文名稱	Creatinine body fluid , urine			
適應症	尿液肌酸酐能被用來估算腎小球過濾速率，用於診斷和治療腎臟疾病，監控腎透析，以及作為其他尿液分析物測定資料的計算基礎。			
檢體類別	體液、尿液。			
操作頻率	每日			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告。 急作檢體：1 小時完成發報告。			
參考範圍	體液：N/A 尿液：男性：1.0-2.0 g/day ； 女性：0.8-1.8 g/day			
採檢容器和檢體量	尿管 10ml			
採檢注意事項	1. 建議採取新鮮尿液送檢。 2. 24 小時尿液收集請參考本科衛教單。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：未完成測試之標本收藏時須冷藏或冷凍保存。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	09016C	點數	40 點
檢驗方法及說明	● 方法：Jaffe method ● 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)：0.13-1,200 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.13 mg/dL ● 干擾： 1. Bilirubin 會使結果稍為偏低，造成負誤差。 2. Ascorbic acid 會使結果稍為偏高。			