

檢驗項目	Crea			版本 2015.03.25
中文名稱	肌酸酐			
英文名稱	Creatinine			
適應症	常用於評估腎功能障礙的嚴重程度及腎臟病的病情監控，但不適用於早期腎臟疾病的篩檢。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma。			
操作頻率	每日			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	男：0.7 –1.5 mg/dL 女：0.5 –1.2 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09015C	點數	40 點
檢驗方法及說明	- 方法：Kinetic Alkaline Picrate。 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.05 - 37 mg/dL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.05 mg/dL - 干擾： 各物質在下列濃度會對此檢驗數值產生干擾 - Bilirubin ≥ 60 mg/dL - Glucose ≥ 600 mg/dL - Portein ≥ 14.3 g/dL			