

檢驗項目	CEA			版本 2015.03.25
中文名稱	癌胚胎抗原			
英文名稱	Carcinoembryonic antigen			
適應症	可用於輔助 CEA 濃度出現變化的癌症病人之預後及治療。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一、三、五			
操作時效	1 周完成發報告			
參考範圍	0-5 ng/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12021B	點數	400 點
檢驗方法及說明	- 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.5 – 1,498,500 ng/mL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 ng/mL - 干擾：人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。			