

檢驗項目	FSH			版本 2015.03.25
中文名稱	濾泡刺激素			
英文名稱	Follicle-stimulating hormone			
適應症	輔助評估性腺衰竭（gonadal failure）			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周二			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	男性： 0.95-11.95 mIU/mL 女性： 濾泡期 3.03 - 8.08 mIU/mL 月經中期高峰 2.55 - 16.69 mIU/mL 黃體期 1.38 - 5.47 mIU/mL 停經後 26.72 - 133.41 mIU/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 1 天；如未於當天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09125C	點數	180 點
檢驗方法及說明	- 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.05 – 750 mIU/mL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.05 mIU/mL - 干擾： 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。			

2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。