檢驗項目	Glu 版本 2015.03.25				
中文名稱	葡萄糖				
英文名稱	Glucose				
適應症	血糖的測定主要使用於糖尿病及其相關疾病之追蹤治療				
檢體類別	紅黃頭管血清 Serum 綠頭管血漿 Plasma 灰頭管血漿 Plasma				
操作頻率	每天				
操作時效	8 小時完成發報告				
參考範圍	60–99 mg/dL				
採檢容器和檢體量	5 mL, SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血 灰頭管 2mL 全血				
採檢注意事項	血糖檢體要立刻檢測,若未能立刻檢測應先分離血球與血漿在保存,因爲未迅速與血球分離的血清,或未添加 NaF 抗凝劑的全血,其血糖值會以每小時 5% 左右的速度下降。				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間			週六收檢時間
	本院2樓檢驗科	8:00-21:00			8:00-17:00
	備註:例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話: 02-2858-7000#7156	
注意事項	 飲食限制:需空腹至少 6 小時,或依醫囑要求 保存方法:檢體 若當天未能立即檢測,應立即分離血漿與血球,測試前最多可於 2-8℃儲存 7 天,如未於 7 天內進行測試,應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 運送條件:室溫 				
健保代碼與給付點數	健保碼	09005C	點數	t	50 點
檢驗方法及說明	 方法: Hexokinase/G-6-PDH 報告範圍(Clinically reportable range, CRR): 5 −700 mg/dL 分析敏感度(Analytical sensitivity): 5 mg/dL 				