

檢驗項目	HCG, urine			版本 2015.03.25
中文名稱	懷孕試驗-尿液			
英文名稱	HCG, urine			
適應症	主要作為懷孕的篩檢，也可作為癌症篩檢指標，如絨毛膜癌、睪丸癌、生殖細胞瘤。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	Negative			
採檢容器和檢體量	 S-Y 尿管，採取 10 ml 尿液，不得低於 1ml			
採檢注意事項	隨機採取中段尿送檢，最好是早晨第一泡尿液；特殊狀況時，依醫囑執行並於報告中註明。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	06505C	點數	100 點
檢驗方法及說明	● 檢驗原理： EIA 酵素免疫分析法，試劑套組 test membrane 上含有 anti HCG monoclonal antibody-colloid，若尿液檢體含 HCG，則會與 colloid 上之抗體結合形成複合物，移動到反應視窗時，會被另一固定的 anti HCG monoclonal antibody 抓住而呈色。			