

檢驗項目	Haptoglobin (HPT)			版本 2015.03.25
中文名稱	結合蛋白			
英文名稱	Haptoglobin			
適應症	Haptoglobin 的主要用途在評估溶血性疾病的發生，也可做為急症及發炎狀態的指標。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	小孩： 20-160 mg/dL 成人： 30-200 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於 -20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12046B	點數	275 點
檢驗方法及說明	● 方法：免疫比濁法(Nephelometry)。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：4 – 1,000 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：4 mg/dL ● 干擾： 各物質在下列濃度會對此檢驗數值產生干擾 1. Hemoglobin≥2000 mg/dL			