

檢驗項目	HBe Ag			版本 2015.03.25
中文名稱	B 型肝炎 e 抗原			
英文名稱	HBeAg			
適應症	輔助診斷或監控 B 型肝炎感染			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週三			
操作時效	5 工作天完成發報告			
參考範圍	< 1.00 COI Non-Reactive			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	140335	點數	250 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：電子化學冷光免疫分析法(ECLIA, Electro-chemiluminescence immunoassay) ● 干擾： <ol style="list-style-type: none"> 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。 			