

檢驗項目	HBs Ab			版本 2015.03.25
中文名稱	B 型肝炎表面抗體			
英文名稱	Hepatitis B surface antibody			
適應症	監測 B 型肝炎感染患者之漸癒及恢復情形			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一、三、五			
操作時效	5 工作天完成發報告			
參考範圍	< 10.00 IU/L Non-Reactive			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	14033C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：電子化學冷光免疫分析法(ECLIA, Electro-chemiluminescence immunoassay) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0-25,000 IU/L ● 干擾： 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 肝素治療患者之檢體可能因纖維蛋白存在而產生錯誤之結果。為了避免這個現象發生，須在進行肝素治療前抽取檢體。			