

檢驗項目	Influenza A Ag / Influenza B Ag 流感病毒 A 型抗原 / 流感病毒 B 型抗原 版本 2015.03.25		
中文名稱	流感病毒 A 型抗原 / 流感病毒 B 型抗原		
英文名稱	Influenza A Ag / Influenza B Ag		
適應症	快速篩檢流感病毒 A 型抗原 / 流感病毒 B 型抗原		
檢體類別	鼻咽拭子(Nasopharyngeal swab)		
操作頻率	每天		
操作時效	30 分鐘完成發報告		
參考範圍	陽性：Positive 陰性：Negative		
採檢容器和檢體量	 <p style="text-align: center;">檢驗室提供原廠 Nasopharyngeal swab 採檢套組，供臨床醫師採檢。</p>		
採檢注意事項	採檢後請立即送檢		
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	儲存：4℃ 運送：室溫		
健保代碼與給付點數	Influenza A & B Ag-收費碼(組合)-90614Y65；自費；點數-390 點 Influenza A Ag-收費碼-90614S65；自費；點數-195 點 Influenza B Ag-收費碼-90614S66；自費；點數-195 點		
檢驗方法及說明	免疫色層分析法 (Immunochromatographic assay) Binax 快篩試劑套組使用能夠辨識 A、B 流感病毒核蛋白的單株抗體，以檢測流感病毒。當檢體加入時，試劑區的 膠體金標記的抗 A 與抗 B 流感病毒單株抗體被溶解，與檢體中的流感病毒抗原結合形成免疫複合物，這些複合物因毛細現		

象繼續流動，經過檢測區時，被固定在膜上的抗 A 與抗 B 流感病毒單株抗體捕捉，形成粉紅色條帶。呈藍色條帶的控制線因固定在膜上的抗免疫球蛋白單株抗體捕捉到膠體金抗體而形成粉紅色條帶，控制線呈粉紅色是用來確認檢驗操作正確，試藥有效。