

檢驗項目	Cholesterol-LDL(LDL-C)			版本 2015.03.25
中文名稱	低密度脂蛋白膽固醇，俗稱壞膽固醇			
英文名稱	Low density lipoprotein cholesterol			
適應症	主要應用於和其他的脂蛋白共同推斷冠心病 (coronary heart disease ; CHD) 的危險機率。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每日			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	<160 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)		 綠頭管 3ml 全血	
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7 : 30 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09044C	點數	250 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：Liquid Selective Detergent method。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：10 – 800 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：10 mg/dL ● 干擾：若樣本的三酸甘油酯濃度>1293mg/dl(14.61 mmol/L)則勿用來做 LDL-C 的檢測。 			