

檢驗項目	Lipase			版本 2015.03.25
中文名稱	解脂酶			
英文名稱	Lipase			
適應症	胰腺疾病的診斷指標及做為治療效果相關聯的監測			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鍾完成發報告			
參考範圍	8-78 U/L			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09064C	點數	150 點
檢驗方法及說明	- 方法：Quinone Dye。 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：1.6 – 10,000 U/L - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1.6 U/L - 干擾： 各物質在下列濃度會對此檢驗數值產生干擾 1. Bilirubin ≥30 mg/dL			