

檢驗項目	Mixing PT(0 hr,2 hr)			版本 2015.03.25
中文名稱				
英文名稱	Mixing PT(0 hr,2 hr)			
適應症	檢測當PT延長時是因凝固因子缺乏或是抑制物造成之檢驗，如為凝固因子缺乏則立即混合或混合後兩小時檢測均可補正。如果兩種混合任一或都不可補正時，表示檢體中有抑制物質存在，通常使PT延長之抑制物較少。			
檢體類別	藍頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	7 天完成發報告(北榮代檢)			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 藍頭管(3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml			
採檢注意事項	1. 避免溶血。 2. .一定要採血 1.8 ml ，否則會影響檢驗結果。 3. 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 4. 應 避免 由 Heparin Flush 過的 靜脈導管(或留滯針) 中採取檢體，因其可能造成檢體被 Heparin 污染或稀釋。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼		點數	
檢驗方法及說明				