

檢驗項目	NT-ProBNP			版本 2015.03.25								
中文名稱	原生 B 型利納勝											
英文名稱	N-terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)											
適應症	定量血漿中的 NT-ProBNP，可幫助診斷充血性心衰竭。充血性心衰竭病人 NT-ProBNP 會升高，且呈現正相關。對於呼吸困難的病人，可以 NT-ProBNP 區分病因是 CHF 充血性心臟衰竭或是 COPD 慢性阻塞性肺病。											
檢體類別	綠頭管--血漿 Plasma											
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)											
操作時效	5 工作日完成發報告											
參考範圍	<table><tr><th colspan="2">參考值</th><th rowspan="3">報告範圍</th><th rowspan="3">單位</th></tr><tr><td>75 歲以下</td><td>< 125</td></tr><tr><td>75 歲以上</td><td>< 450</td></tr></table>				參考值		報告範圍	單位	75 歲以下	< 125	75 歲以上	< 450
參考值		報告範圍	單位									
75 歲以下	< 125											
75 歲以上	< 450											
採檢容器和檢體量	 綠頭管 (Sodium Heparin)，採取 3 ml 全血											
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。											
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間									
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00									
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156									
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：高劑量 biotin(> 5 mg/天)，要服藥後 8 小時才可採檢。 ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫											
健保代碼與給付點數	健保碼	12193B	點數	800 點								
檢驗方法及說明	● 檢驗原理：Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)電子冷光免疫分析法，利用單株抗體及帶有標幟 ruthenium complex 單株抗體與待測物形成複合物，再利用電極的電壓引發化學冷光，偵測其反應再對應至標準曲											

線，即可獲得檢驗數據。