

檢驗項目	New MAST allergy				版本 2015.03.25	
中文名稱	特異過敏原測定					
英文名稱	New MAST allergy					
適應症	No	過 敏 原 種 類		No	過 敏 原 種 類	
	01	乳膠	Latex	19	狗牙根	Berm. Grass
	02	酪梨	Avocado	20	黑柳	Willow.black
	03	豬肉	Pork	21	尤加利	Eucalyptus
	04	牛肉	Beef	22	日本杉	Japan.cedar
	05	牛奶	milk	23	白桑	Mulberry
	06	起士	Cheese	24	莧科	Pigweed
	07	蝦	Shrimp	25	豕草混合	Ragwd mix I
	08	螃蟹	Crab	26	牧草	Timo.grass
	09	蚌殼類	Clam	27	交錯黴菌	Alternaria
	10	鱈魚	Codfish	28	麴菌	Aspergillus
	11	鮪魚	Tuna	29	芽枝菌	Cladospori
	12	花生	Peanut	30	青黴菌	Penicilliu
	13	黃豆	Soybean	31	貓毛	Cat
	14	小麥	Wheat	32	狗毛	Dog
	15	啤酒酵母	Brew.Yeast	33	家塵	Housedust
	16	蛋黃	Egg Yolk	34	蟑螂	Cockroach
	17	蛋白	Egg WhiteT	35	美洲塵蟎	Mite.DF
	18	雞毛	Chic.Feathes	36	歐洲塵蟎	Mite.DP
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum					
操作頻率	每週一次(北榮代檢)					
操作時效	7 工作日完成發報告					
參考範圍	Class (螢光分級強度)		過敏反應程度			
	0		無反應			
	=		極弱			
	1		弱			
	2		中等			
	3		強			
	4		極強			

採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	30022C	點數	1620 點
檢驗方法及說明				