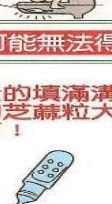
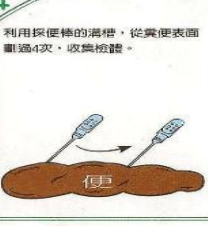


檢驗項目	OB (EIA) , Stool			版本 2015.03.25
中文名稱	糞便潛血(免疫分析)			
英文名稱	Occult Blood (EIA) , Stool			
適應症	主要用於檢測糞便中人類血液，具有良好的特異性，可做為評估下消化道是否出血的依據。提供早期大腸直腸癌及息肉之篩檢、診斷和治療追蹤。			
檢體類別	糞便			
操作頻率	每周一、三(例假日除外)			
操作時效	8 小時完成報告			
參考範圍	檢驗項目	參考值	報告範圍	單位
	OB(EIA)	Negative	N/A	N/A
採檢容器和檢體量	 Kyowa HM-JACK 專用採便容器，採檢約 0.4~0.5mg 填滿採檢棒溝槽即可。			
採檢注意事項	大腸癌檢查 正確的採便方法  為了能進行正確的檢查請務必閱讀以下說明： - 為了能得到正確檢查結果，採便後請儘快送檢。 - 採便後請存放在陰涼、避光場所。 - 遇痔瘡出血或女性生理期，請勿採便。 1  請張開標籤並寫下日期及姓名，完成後將標籤貼回貼好。 2 洋式  請務必先鋪好衛生紙，避免採便時，檢體受污染。 和式  衛生紙 3  輕輕地拉起採便棒。 ※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果。※ 4  利用採便棒的溝槽，從糞便表面劃過4次，收集檢體。 5 ※適量的填滿溝槽大約芝麻粒大小即可！  採大約 0.4~0.5mg 6  將採便棒推入採便容器內，請不要再刮，以免漏液或微生物入侵影響。 1.如遇痔瘡出血或女性生理期時，請勿採檢。 2.採集完畢後，勿再抽出重複採集檢體。 3.將採便棒置入綠色包裝袋中避光，放置陰涼處，立即送檢。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	

注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：避光保存。若無法當日檢驗者，應放於 4℃ 中保存，且以一星期內為限。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	09134C	點數	80 點
檢驗方法及說明	● 方法：EIA/LIA。 ● 干擾因素: 痔瘡出血或女性生理期會造成偽陽性結果。			