

檢驗項目	Parasite ova (conc. method)			版本 2015.03.25
中文名稱	寄生蟲卵-糞便(濃縮法)			
英文名稱	Parasite ova (conc. method)			
適應症	觀察檢體中是否存在蟲卵、蟲體或原蟲活動體、囊體，提供醫師臨床上之診斷。			
檢體類別	糞便			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	Not found			
採檢容器和檢體量	 濃縮專用採便瓶，取半個拇指大小之固狀糞便； 若為液狀便，則取 2~3 ml。			
採檢注意事項	1. 要避免水、尿液或血液的污染，切勿將糞便解於衛生紙上，腹瀉時可先以紙杯接取部分糞便，再以採便棒挖取糞便，放入瓶內後旋緊瓶蓋。 2. 連續採檢的檢體，須清楚標示採檢順序及時間。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：服用制酸劑、止瀉劑、抗生素、礦物油或鋇劑，服用後 7-10 日才可進行此項檢查，若服用抗菌劑，則需在服用後 2~3 周才可檢查。 ● 保存方法：室溫(立即送檢，懷疑有 <i>Amoeba trophozoite</i> 時， 須 37℃ 保溫送檢) ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	27012C	點數	50 點
檢驗方法及說明	● 檢驗原理及方法： 濃縮法(硫汞-碘-甲醛離心沈澱法 MIF method)，是利用溶液中的 Formalin 固定蟲體，Iodine 將原蟲 cyst 的核染色，Merthiolate 是將蟲卵染色，同時形成紅色的背景，以利觀察。將糞便檢體以 MIF solution 處理後，取適量沉澱			

物進行鏡檢，先以 10 倍物鏡篩檢整張抹片，若發現疑似寄生蟲時，再以 40 倍物鏡做鑑別確認。