

檢驗項目	PSA –free (free PSA)			版本 2015.03.25
中文名稱	游離攝護腺特異抗原			
英文名稱	Free Prostate-Specific Antigen			
適應症	計算 Free/Total PSA 比值可用於輔助區別攝護腺癌和良性疾病			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週六(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	0.0 - 0.5 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	用藥限制：荷爾蒙療法會影響 PSA 的表現，因此在接受任何含有荷爾蒙療法的治療後所測得的低 PSA 值可能不足以反映出是否有疾病的殘餘或復發。 - 保存方法：檢體測試前最多可於 2-8℃ 儲存 24 小時，如未於 24 小時內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12198C	點數	400 點
檢驗方法及說明	方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR):0.008-30 ng/mL - 分析敏感度(Analytical sensitivity):0.008 ng/mL - 干擾： 1.不可使用嚴重溶血的檢體。 2.人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。			