

檢驗項目	Parasite ova (direct method)			版本 2015.03.25
中文名稱	寄生蟲卵-糞便(直接法)			
英文名稱	Parasite ova (direct method)			
適應症	觀察檢體中是否存在蟲卵、蟲體或原蟲活動體、囊體，提供醫師臨床上之診斷。			
檢體類別	糞便			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	Not found			
採檢容器和檢體量		糞便瓶 半個拇指大小之固狀糞便		無菌廣口瓶 液狀便，則取 2~3 ml。
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>要避免水、尿液或血液的污染，切勿將糞便解於衛生紙上，腹瀉時可先以紙杯接取部分糞便，再以採便棒挖取糞便，放入瓶內後旋緊瓶蓋。</li> <li>連續採檢的檢體，須清楚標示採檢順序及時間。</li> </ol>			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 飲食限制：無。</li> <li>● 用藥限制：服用制酸劑、止瀉劑、抗生素、礦物油或鋇劑，服用後 7-10 日才可進行此項檢查，若服用抗菌劑，則需在服用後 2~3 周才可檢查。</li> <li>● 保存方法：室溫(立即送檢，懷疑有 <i>Amoeba trophozoite</i> 時，須 37°C 保溫送檢)</li> <li>● 運送條件：室溫。</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	07001C	點數	25 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢驗原理及方法： 直接法，取適量沉澱物進行鏡檢，先以 10 倍物鏡篩檢整張抹片，若發現疑似寄生蟲時，再以 40 倍物鏡做鑑別確認。</li> </ul>			