

檢驗項目	Pregnancy test.EIA			版本 2015.03.25
中文名稱	懷孕試驗			
英文名稱	Pregnancy test.EIA			
適應症	尿液妊娠檢查			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	陰性:Negative 陽性:Positive			
採檢容器和檢體量	 紅蓋 S-Y 尿管，採取 10 ml 尿液，不得低於 5 ml。			
採檢注意事項	隨機採集的尿液 2ml 以上作檢查			
收檢時間與地點	收檢地點		平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科		8：00-21：00	8：00-17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 請 12 小時內測定，為保護賀爾蒙活性 ● 不可使用血清和其他體液檢體 ● 嚴重血尿，膿尿或其他異合物質亦能干擾正確結果			
健保代碼與給付點數	健保碼	06505C	點數	100 點
檢驗方法及說明	免疫色析法又稱為免疫薄層移動法，試劑條上有 Anti-HCG，尿液中若含有 HCG 會與之結合，結合物泳動至 Test 觀察窗與其 Anti-B 呈色物結合而呈現色帶;多餘的 Anti-HCG 泳動至 Control 觀察窗，與其 Anti-mouse IgG 結合而呈現色帶，反之只有 C 區會呈現色帶			