

檢驗項目	TB culture			版本 2015.03.25
中文名稱	分枝桿菌培養			
英文名稱	Mycobacteria culture			
適應症	適用於懷疑結核菌感染之培養及鑑定，提供臨床診斷和使用抗生素的參考			
檢體類別	參見各類培養適用檢體對照表			
操作頻率	週一至週六(北榮代檢)			
操作時效	8 週；陽性反應待鑑定後發報告；陰性反應 8 週發陰性報告			
參考範圍	陰性 (Negative)			
採檢容器和檢體量	 依照檢體類別，選擇適當無菌容器。AFB stain 及 TB culture 為套組，請同時開立，並使用同一檢體即可。 若懷疑病患感染，最好連續送三套痰檢體，提高檢出率。			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	1. 請勿以棉籤拭子送檢 2. 在治療前收集原始標本 3. 收集時避免正常菌叢之污染 4. 需收集足量的檢體，並且不可使用任何固定液、防腐劑和抗凝劑 5. 若病人無法咳出痰液可利用下列方式取得檢體：導痰、胃洗出液、支氣管沖洗、刷洗和氣管穿刺抽取液 ● 保存方法：立即送檢，若無法於 2 小時內送檢，須存放於 4℃，不可超過 24 小時 ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室 ● 飲食限制：無			

	● 用藥限制：無			
健保代碼與給付點數	健保碼	13026C	點數	304 點
檢驗方法及說明	● 方法：MGIT 全自動連續螢光篩檢分枝桿菌偵測儀 Immunochromatographic-ICA ● 干擾因素：無			