

檢驗項目	Testosterone			版本 2015.03.25
中文名稱	睪丸酮			
英文名稱	Testosterone			
適應症	輔助評估男性的不孕及女性的多毛症和男性化			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	男性：1.74-8.43 ng/mL 女性：0.11-0.78 ng/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09121B	點數	150 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.04 – 18.62 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.04 ng/mL ● 干擾： 1. 19-nortestosterone(Nandrolone) > 30 nmol/L 2. 11β-hydroxytestosterone > 5 nmol/L			