

檢驗項目	UA			版本 2015.03.25
中文名稱	尿酸			
英文名稱	Uric acid			
適應症	1. 常用在痛風 (gout) 的診斷與治療追蹤 2. 可與尿液尿酸濃度共同評估尿路結石的發生機率及是否有大量組織壞死的危機			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	2.6 - 7.2 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 用藥限制：消炎或降尿酸藥物至少停用 3 天後再檢測 ● 保存方法：若未能立即檢測，須先分離血球與血漿再置於 2-8℃ 儲存 7 天，如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09013C	點數	40 點
檢驗方法及說明	● 方法：尿酸酶法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.06 – 100 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.06 mg/dL			