

檢驗項目	VZV IgG				版本 2015.03.25
中文名稱	水痘帶狀疱疹病毒 IgG 抗體檢測				
英文名稱	VZV IgG				
適應症	用於檢測是否感染過水痘帶狀疱疹病毒之檢驗，以及是否需要注射疫苗、疫苗注射效果				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍	陰性(Negative)				
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	14068B	點數	200 點	
檢驗方法及說明					