

血液培養檢體 採集建議

標準操作流程

使用採血針筒採血的方法

1> 準備採血所需的物品

準備採血所需的物品，並且確定要使用的血瓶還在有效期限內，檢查血瓶的狀態，確定沒有任何的破損或汙染。



2> 消毒接種血瓶

依照標準程序洗手或使用酒精性乾洗手，打開血瓶塑膠上蓋，使用棉棒或棉球沾取70 %酒精消毒橡膠瓶塞，再用2 %碘酊消毒，等待乾燥後再用70%酒精消毒，每個步驟都應該使用新的棉棒或棉球，並確實等待乾燥。



3> 消毒靜脈採血部位

核對病人身份，若是採檢部位明顯有髒汙，應該先清洗乾淨；以適當的壓力在上臂綁上止血帶，用手觸摸尋找適合採血的靜脈，使用棉棒或棉球沾取70 %酒精以同心圓向外消毒採血部位，再用2%碘酊消毒，等待乾燥後再用70%酒精消毒，每個步驟都應該使用新的棉棒或棉球，並確實等待乾燥。



4> 洗手戴手套

依照標準程序洗手或使用酒精性乾洗手，清潔完成後，戴上檢驗手套。



5> 靜脈採血

將針頭確實接在針筒上，為避免汙染，不要再用手觸碰已經消毒的部位，將針插入靜脈內採集足夠的血液。



6> 血瓶接種

將採集的靜脈血先接種入厭氧血瓶中，再接種入需氧血瓶中。參考針筒上的刻度線，成人血瓶每瓶應接種5-10 mL，小兒血瓶每瓶應接種1-4 mL。



7> 完成血液培養採集程序

將針頭丟棄在針頭感染性廢棄物容器中，脫掉手套並洗手，建議紀錄採血時間、位置或其他情況，例如血量不足等。貼上標籤或書寫其他資料，但是不要將瓶身上的條碼掩蓋。



bioMérieux S.A.
69280 Marcy l'Etoile
France

www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.com

