

檢驗項目	Cholesterol-HDL(HDL-C)			版本 2025.11.01
中文名稱	高密度脂蛋白膽固醇			
英文名稱	High density lipoprotein cholesterol			
適應症	評估冠狀動脈疾病的發生機率。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma。			
操作頻率	每日			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告。 急作檢體：1 小時完成發報告。			
參考範圍	>40(M), >50(F) mg/dL			
採檢容器和檢體量		5 mL , SST tube(紅黃頭管) 血		綠頭管 3ml 全
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7 : 30 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09043C	點數	200 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：Accelerator Selective Detergent method。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：2.5 – 180 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2.5 mg/dL ● 干擾： <p>各物質在下列濃度會對此檢驗數值產生干擾</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilirubin≥32 mg/dL 2. Intralipid≥2000 mg/dL 			