


檢驗項目	Amoeba,direct smear			版本 2025.10.31
中文名稱	阿米巴寄生蟲(直接法)			
英文名稱	Amoeba,direct smear			
適應症	阿米巴性痢疾是痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病。痢疾阿米巴主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，但痢疾阿米巴原蟲可能侵入宿主的腸壁組織，引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。			
檢體類別	糞便			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：1 天完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	Not found			
採檢容器和檢體量		糞便瓶 半個拇指大小之固狀糞便		無菌廣口瓶 液狀便，則取 2~3 ml。
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 要避免水、尿液或血液的污染，切勿將糞便解於衛生紙上，腹瀉時可先以紙杯接取部分糞便，再以採便棒挖取糞便，放入瓶內後旋緊瓶蓋。 連續採檢的檢體，須清楚標示採檢順序及時間。 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8:00 - 21:00	8:00 - 12:00	
備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：服用制酸劑、止瀉劑、抗生素、礦物油或鋇劑，服用後 7-10 日才可進行此項檢查，若服用抗菌劑，則需在服用後 2~3 周才可檢查。 ● 保存方法：室溫(立即送檢，懷疑有 <i>Amoeba trophozoite</i> 時，須 37°C 保溫送檢) ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	07001C	點數	25 點

檢驗方法及說明

- 檢驗原理及方法：

直接法，取適量沉澱物進行鏡檢，先以 10 倍物鏡篩檢整張抹片，若發現疑似寄生蟲時，再以 40 倍物鏡做鑑別確認。