

檢驗項目	<b>Bil-T</b>			版本 2025.10.08
中文名稱	總膽紅素			
英文名稱	Total Bilirubin			
適應症	總膽紅素在臨床上常用來評估肝膽疾病與溶血性疾病			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：1 天完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	0.2-1.6 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)		 綠頭管 3ml 全血	
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	09029C	點數	50 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法：Diazo Reaction</li> <li>● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.05-200 mg/dL</li> <li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.05 mg/dL</li> <li>● 干擾：           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intralipid &gt; 750 mg/dL</li> <li>2. Indican &gt; 0.175 mmol/L</li> </ol> </li> </ul>			

