

檢驗項目	CEA			版本 2026.04.29
中文名稱	癌胚胎抗原			
英文名稱	Carcinoembryonic antigen			
適應症	可用於輔助 CEA 濃度出現變化的癌症病人之預後及治療。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一、三、五			
操作時效	1 周完成發報告			
參考範圍	0-5 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 <p>5 mL , SST tube(紅黃頭管)</p>			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12021B	點數	400 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光微粒免疫分析法 (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay ; CMIA) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.5 – 1,498,500 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 ng/mL ● 干擾：人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。 			